

Sicherheits- und Anwendungshinweise für die IEA Green Kalt-Warm-Kompresse

1. Kälteanwendung:

- Die Kompresse für etwa 2 Stunden in den Gefrierschrank legen.
- Die gekühlte Kompresse in kurzen Abständen (max. 20 Minuten) anwenden, um eine optimale Schmerzlinderung zu erzielen.

2. Wärmeanwendung:

- Die Kompresse für 5–10 Minuten in fast kochendem Wasser oder 30 Sekunden in der Mikrowelle (600 Watt) erwärmen.
- Anschließend durchkneten, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

- Immer eine Schutzlage zwischen Kompresse und Haut legen, um Verbrennungen oder Erfrierungen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontakt Hersteller: info@intco.com



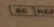
DE - Kalt & Warm Kompressen
EN - Hot Cold compress
FR - Comresse chaude froide
IT - Comresse caldo freddo
ES - Compresas frías y calientes



Quantity: 24
Transportation and Storage Environment:
Temperature: 0°C ~ +55°C
Relative Humidity: 45% - 75%
Atmospheric Pressure: 750hPa ~ 1060hPa

13x14cm

 **INTCO MEDICAL(HK) CO., LTD**
Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong
Mail: info@intco.com

 **MedNet EC-REP GmbH**
Bockstraße 10, 48163 Münster,
Germany
Mail: contact@mednet-ecrep.com

DVV DEUTSCHER
VOLLEYSBALL
VERBAND

