


# AUDISPRAY

## ADULT 12+

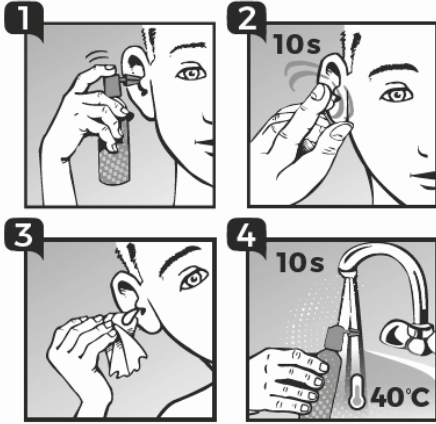

Laboratoires DIEPHARMEX S.A.  
Avenue Rosemont 8  
1208 Geneva SWITZERLAND  
Tel.: +41 (0) 22 718 64 20  
info@dlepharmex.com



ASA.NOT.10.2018-REV3  
DI5499

### DE

#### NUR EIN EINFACHER SPRÜHSTOSS FÜR EINE WIRKSAME OHRENHYGIENE

##### AUDISPRAY ADULT ein 100% natürliches Produkt

AUDISPRAY ADULT enthält eine hypertonische, mikrobiologisch kontrollierte Meerwasserlösung. AUDISPRAY ADULT ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

##### Was ist AUDISPRAY ADULT?

AUDISPRAY ADULT weicht und löst das Ohrschmalz auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach aussen, Richtung Ohrmuschel. Regelmäßig angewendet beugt AUDISPRAY ADULT der Ansammlung von Ohrschmalz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. AUDISPRAY ADULT enthält kein Treibgas und ist mit einem Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht.

##### Wer kann AUDISPRAY ADULT verwenden?

**Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:** 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr zweimal wöchentlich. Bei Trägern von Hörgeräten empfiehlt es sich, AUDISPRAY ADULT jeden Abend nach dem Entfernen des Hörgeräts anzuwenden, damit das Ohrschmalz die Funktionsfähigkeit des Hörgeräts nicht beeinträchtigt.

##### Wie wird AUDISPRAY ADULT angewendet?

1. Setzen sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs an und sprühen Sie ein- bis zweimal in jedes Ohr. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.

3. Neigen Sie den Kopf zur Seite, um überschüssige Flüssigkeit auslaufen zu lassen und abzuwischen.
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.

##### Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen Personen, die eine Vorgeschichte mit Ohrenleiden (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe...) haben oder hatten.

##### Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen vor dem Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein Ohrschmalzpfropfen gebildet hat, kann AUDISPRAY ADULT zur Aufquellung des Pfropfens führen und Schmerzen verursachen. Suchen Sie in diesem Fall bitte Ihren Arzt auf.

Es wird empfohlen, AUDISPRAY ADULT im Laufe des Jahres nach der ersten Anwendung aufzubrauchen. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung und der Flasche angegebene Haltbarkeitsdatum.

Alle schwerwiegenden, mit AUDISPRAY ADULT zusammenhängenden Zwischenfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden, in dem der Benutzer wohnhaft ist.

AUDISPRAY ADULT ist ein Medizinprodukt, konform mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG