


Anwendungstipps für die Blepha Cura® Wärme Gel Maske

1. Es wird empfohlen, die Blepha Cura® Wärme Gel Maske ein- bis zweimal täglich (vor dem Einsetzen der Kontaktlinsen) zu verwenden, z.B. einmal Morgens und einmal Abends.
2. Blepha Cura® Wärme Gel Maske im warmen Wasserbad (ca. 45° C) oder in der Mikrowelle erwärmen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Packungsseite.
3. Beim Aufsetzen zwischen die Gesichtshaut/Augenlid und die Blepha Cura® Wärme Gel Maske z.B. eine angefeuchtete Kompresse/Wattepad legen, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
4. Die auf ca. 45° erwärmte Blepha Cura® Wärme Gel Maske für ca. 4 - 10 Minuten auf die geschlossenen Augenlider aufliegen und gegebenenfalls mit dem Gummiband fixieren.
5. Danach eine sanftere Massage der Lidränder durchführen.
6. Abschließend die Augenlider mit einem fusselfreien Wattepad, getränkt mit geeigneter (idealerweise tensidfreier) Reinigungssuspension, säubern.

Gebrauchsinformation/Warnhinweise:

- Bitte lesen Sie die Anwendungstipps, Gebrauchsanweisung und Gebrauchsinformation auf der Packung sorgfältig durch.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Bei Kindern nur unter Aufsicht und nach Rücksprache mit dem Augenarzt oder Apotheker anwenden.
- Kontaktlinsen vor der Anwendung herausnehmen.
- Bei Hitze- oder Kälteempfindlichkeit die Anwendung sofort abbrechen und Augenarzt/Apotheker aufsuchen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist (das rote Gel austritt) nicht mehr benutzen, sondern im Hausmüll entsorgen.
- Nicht gleichzeitig mit Augentropfen, Augensalben oder Gel verwenden, mind. 15 Minuten warten, bevor diese Mittel wieder angewendet werden.
- Falls die Haut oder die Augen mit dem Inhalt der Gel Maske in Kontakt gekommen sind, die betreffenden Stellen mit sauberen Wasser gründlich abspülen.
- Nach jeder Anwendung mit einer milden Seifenlösung reinigen.
- Nicht zum Verzehr geeignet!
- Maske nicht zu stark erhitzen. Nicht zu lange im Eisfach aufbewahren. Direkten Hautkontakt aufgrund möglicher Erfrierungen/Verbrennungen vermeiden! Spitze Gegenstände von der Maske fernhalten und keine schweren Gegenstände auf die Wärme Gel Maske stellen. Kühl aufbewahren.

Liderwärmung:

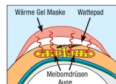

Reinigung Oberlid: von oben nach unten zur Lidkante hin abwischen



Reinigung Unterlid: von unten nach oben zur Lidkante hin abwischen



www.blephacura.de

Servicecenter
Anschaffungsstelle der
Arbeitsnummer 30550

Hersteller:
Lidpflege GmbH
bei Friedrich Strauß

Vertrieb:
Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstraße 49
D-05399 Niesbrosch

Einzelverpackung:
5% Polypropylen

25% Polypropylen

70% Wasser

Blepha Cura
PZN (AT) 38070888
PZN (DE) 38070828

optima

geeignet für
Mikrowellen-
kühl & warm



PHTHALATE
FREE

Blepha Cura® Lidpflege - Lidcare - Soins des paupières - Cura delle palpebre

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Erwärmung im Wasserbad: Legen Sie die Maske für einige Minuten in ca. 45° C warmes Wasser (kein kochendes Wasser verwenden).

Erwärmung in der Mikrowelle: Wickeln Sie die Maske in ein feuchtes Tuch und erwärmen Sie sie gemäß nebenstehender Tabelle. Danach bitte die Temperatur prüfen, halten Sie die Maske hierzu an die Innenseite Ihres Handgelenks. Zur weiteren Erwärmung in 5 Sekunden Intervallen erwärmen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Mikrowellen-Leistung	max. Erwärmungszeit
700 Watt	15 Sekunden
1.000 Watt	12 Sekunden
1.250 Watt	10 Sekunden

Kühlen: Kühlen Sie die Wärme Gel Maske mindestens 2 Stunden im Kühlschrank. Es wird maximaler Hautkontakt von 20 Minuten empfohlen.

03090771